



Charisma® Classic

Experiencia x Investigación = Efecto Microglass® II.

- » **Es fácil de usar. Es brillante. Es para usted:** ¿Esta buscando un fácil manejo, alta calidad y confiabilidad en sus restauraciones? En Kulzer nos esforzamos por superar sus expectativas y mejorar continuamente nuestros productos. Así que hemos puesto nuestro conocimiento científico y la experiencia de muchos años en el desarrollo de un composite novedoso para satisfacer sus necesidades en cuanto a un material restaurador de fácil aplicación y brillo natural. El resultado es Charisma® Classic, nuestro “clásico” de la familia Charisma® que ha sido utilizada en millones de obturaciones por más de 20 años alrededor del mundo.
- » **Lo más destacado de Charisma® Classic:** La tecnología única y patentada de relleno Microglass® II proporciona resultados extraordinarios y un brillo cromático intrínseco. La elaboración de restauraciones estéticas usando solamente un tono nunca ha sido tan fácil.

Salud bucal en las mejores manos.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Charisma® Classic – Los beneficios de Microglass® II.

Los composites convencionales contienen a menudo dióxido de silicio (SiO₂) altamente disperso. Esto, por lo general, conduce a una variación de refracción extremadamente alta y una apariencia lechosa de la restauración. Es por eso que una buena adaptación de color y un aspecto natural son difíciles de lograr con esos materiales.

Charisma® Classic contiene aproximadamente 61% de material de relleno con vidrio de fluoruro de bario y aluminio. La tecnología de relleno Microglass® II no necesita ningún SiO₂ pirogénico adicional, y por lo tanto, ofrece un brillo cromático intrínseco y mejora la adaptación de color. Todos los índices de refracción de nuestra matriz y del sistema de relleno se han alineado de manera óptima. Los pigmentos de color garantizan un brillo cromático muy intenso.




Charisma® Classic – Un composite con una contracción mínima y fácil de manejar.

Queremos lograr restauraciones naturales lo más fácil posible. Así que siempre hemos puesto todo nuestro esfuerzo en la conformación de las propiedades de manejo de todos nuestros composites. Charisma® Classic no es la excepción a esta regla, es una resina compuesta, fotopolimerizable, radiopaca y microhíbrida. Desde su aplicación hasta la fotopolimerización, el manejo de Charisma® Classic es realmente sencillo:

- Su consistencia cremosa permite un modelado fácil y rápido.
- Las propiedades de pulido facilitan un alto brillo en la superficie y un excelente acabado.
- La gama de colores permite una conveniente selección y adaptación del color.
- Su radiopacidad asegura un diagnóstico seguro y confiable.



Charisma® Classic la contracción más baja

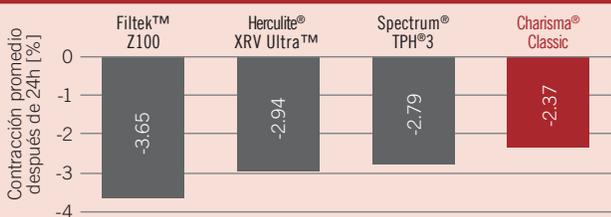

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en este orden (contracción descendiente): Filtek™ Z100 > Herculite® XRV Ultra™, Spectrum® TPH®3 > Charisma® Classic

Fuente: Prof. Takahashi, Prof. Finger, Tokyo Medical & Denta University, Tokyo, Japón. No publicada. Datos en archivo.

Charisma® Classic alto brillo y superficies suaves



Pulido manual con Venus Supra (20 s pulidor gris & 40 s pulidor rosa)

Fuente: R&D Kulzer GmbH, Wehrheim, Alemania. Información no publicada. Datos en archivo



Kulzer México S.A. de C.V.
Tel. (55) 5531-5549
Homero 527 int. 301-302
Polanco Reforma, Miguel Hidalgo
CP 11550, Ciudad de México

web: kulzer.mx
twitter: @kulzermexico
facebook: KulzerMexico
youtube: Kulzer Latinoamérica
contacto-hkxm@kulzer-dental.com

Código:	Artículo:	Contenido:
66056110	Charisma® Classic Syringe Assortment	4 x 4g jeringas (A1, A2, A3, OA2), Colorímetro
66056109	Charisma® Classic Syringe Combi Kit	6 x 4g jeringas (2xA2, 2xA3, A1, A3.5), 1 x 4ml GLUMA 2Bond, 2 x 2.5ml GLUMA Etch 35 Gel, Accesorios
	Charisma® Classic Syringe	1 X 4g (A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, OA2, OA3, OA3.5)