

GLUMA®

Bond Universal



GLUMA® Bond Universal

Todas las técnicas de adhesión dental en un solo frasco.

¿Le gustaría mantener una rutina adhesiva tan sencilla como sea posible? Con base en nuestra gran experiencia en adhesivos dentales hemos desarrollado GLUMA® Bond Universal – un adhesivo universal que responde a todas sus necesidades de adhesión. Es un adhesivo confiable y altamente efectivo que asegura restauraciones exitosas a largo plazo.

Un frasco de nuestro adhesivo verdaderamente universal representa numerosos beneficios para usted:

- » **Un frasco para cualquier técnica adhesiva:** grabado total, grabado selectivo y autograbado.
- » **Un frasco para todos los materiales dentales:** composites, zirconia, metales, etc.
- » **Un frasco para una amplia gama de indicaciones:** restauraciones directas e indirectas y reparaciones intraorales.
- » **Un frasco diseñado para un manejo sencillo y seguro:** con desempeño de vanguardia.

Salud bucal en las mejores manos.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP



¡Hasta 220 gotas
por frasco!

GLUMA® Bond Universal – El adhesivo universal que realmente es universal.

Solo 1 ...


... frasco para todas las técnicas.

Con GLUMA® Bond Universal usted puede elegir con libertad su técnica adhesiva. Ya sea que prefiera el método de grabado total, grabado selectivo o autograbado, siempre va a obtener una unión confiable. Además, estudios muestran bajo margen de error de GLUMA® Bond Universal en cuanto a la técnica de aplicación, confirmando así su fácil manejo.

... fórmula para todos los materiales dentales.

GLUMA® Bond Universal es compatible con todos los materiales dentales – materiales fotocurables, autocurables o duales, cementos a base de resina, materiales para la reconstrucción de muñones, composites tanto autocurables como duales y compomeros para la cementación de restauraciones indirectas – sin la necesidad de un activador dual. Además, puede realizarse la reparación de restauraciones de zirconia, aleaciones preciosas y no preciosas, así como composites de manera sencilla y fácil con una sola capa. Para la adhesión y reparación de cerámicas a base de silicato, simplemente hay que acondicionar la superficie de la restauración con GLUMA® Ceramic Primer previo a la aplicación de GLUMA® Bond Universal.

GLUMA® Bond Universal se adhiere a superficies metálicas y cerámicas

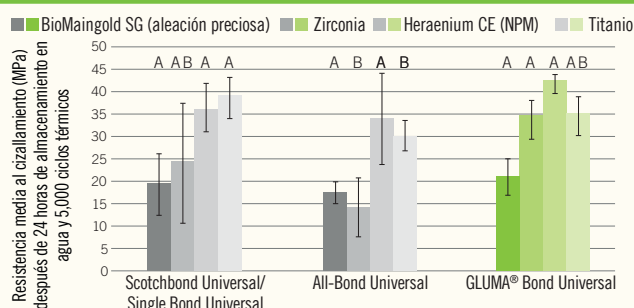


La misma letra significa que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos.

Fuente: datos internos Kulzer, Alemania, 2014.

... paso hacia un flujo de trabajo eficiente.

GLUMA® Bond Universal es efectivo debido a sus propiedades de manejo y su confiable fuerza de adhesión. Para mejorar aún más su desempeño la nueva fórmula contiene MDP. Nuestro sistema de control de humedad único hace que el secado con aire sea muy sencillo y provee una capa adhesiva homogénea.

Fuerza de unión "estándar de oro" con GLUMA® Bond Universal, empleando cualquier técnica de aplicación

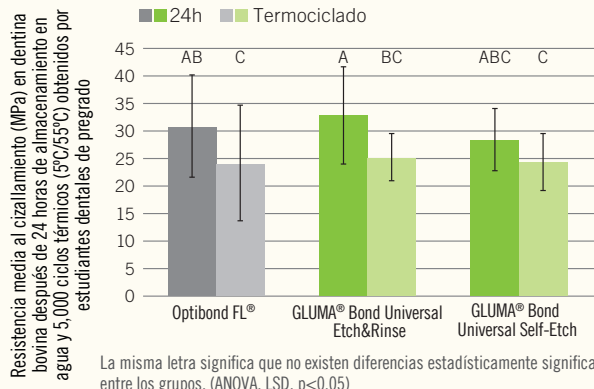

La misma letra significa que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. (ANOVA, LSD, p<0.05)

Fuente: Datos internos, Universidad de Maguncia y Kulzer, Alemania, 2014.

... adhesivo para una amplia gama de indicaciones y reparaciones intraorales.

Un frasco para restauraciones directas e indirectas, así como la reparación intraoral de fracturas y despostillamientos. Para lograr una unión duradera en toda clase de restauraciones directas (según Black), empleando composites o compómeros a base de metacrilato fotocurables, autocurables o duales, en la reconstrucción de muñones, en el sellado de fisuras, en la cementación de restauraciones indirectas con cementos de resina fotocurables, autocurables o duales, así como en la reparación intraoral de restauraciones elaboradas en composite, compómero, cerámica de todo tipo, zirconia y metal.



GLUMA® 2Bond – El sistema Etch & Rinse de Kulzer.


GLUMA® 2Bond es un sistema adhesivo Etch & Rinse (dos pasos) de Kulzer que ofrece todo lo que se puede pedir a un moderno sistema adhesivo de 5ª generación. Gracias a su innovador sistema basado en nanorellenos, GLUMA® 2Bond no sólo cuenta con una gran fuerza de adhesión tanto en esmalte como en dentina, sino también garantiza una adaptación marginal óptima y es ideal para desensibilizar áreas hipersensibles.

A diferencia de lo que sucede con los productos de algunos de sus competidores, GLUMA® 2Bond se aplica en un solo paso después de grabar con GLUMA® Etch 35 Gel.

Código:	Artículo:	Contenido:
66061421	GLUMA® Bond Universal Bottle Refill	1x4ml GLUMA® Bond Universal
66061423	GLUMA® Bond Universal Bottle Professional Kit	1x4ml GLUMA® Bond Universal, 1x4ml GLUMA® Ceramic Primer, 1x2.5ml syringe GLUMA® Etch 35 Gel, 25 aplicadores verdes, 25 aplicadores rojos, 10 cánulas, gradilla.
66061425	GLUMA® Ceramic Primer	1x4ml GLUMA® Ceramic Primer
66040972	GLUMA® 2Bond Bottle Refill	1x4ml GLUMA® 2Bond, 50 aplicadores
66040973	GLUMA® 2Bond Bottle Assortment	1x4ml GLUMA® 2Bond, 50 aplicadores 2x2.5ml GLUMA Etch 35 Gel, 25 cánulas

GLUMA® 2Bond

Resistencia al cizallamiento - Materiales de la competencia

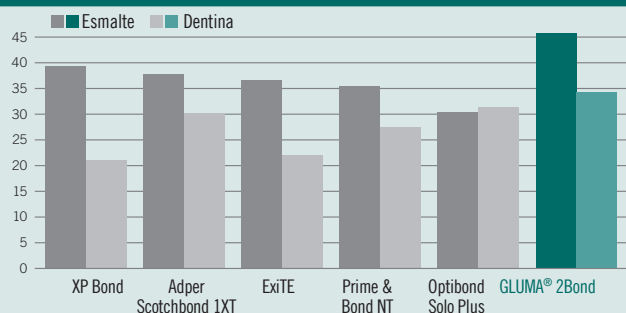

GLUMA® 2Bond muestra la fuerza de adhesión más alta en esta prueba

Fuente: Kulzer GmbH, R&D Bondings, Wehrheim, Alemania.

Kulzer México S.A. de C.V.
Tel. (55) 5531-5549
Homero 527 int. 301-302
Polanco Reforma, Miguel Hidalgo
CP 11550, Ciudad de México

web: kulzer.mx
twitter: @kulzermexico
facebook: KulzerMexico
youtube: Kulzer Latinoamérica
contacto:hkmx@kulzer-dental.com