

3DISC



# Traumatismo dentoalveolar y carga inmediata de diente 1.2 en adulto

Dra Cristina Lobo Santiago, Dra San Martín and Dr Gallegos  
Clínica NOA, Chile

365 Herndon Pkwy #18  
Herndon, VA 20170,  
USA

3DISC Dental Connect  
Tour CB21 - 16 Place de l'Iris -  
92400 Courbevoie - France

info@3disc.com  
www.3DISC.com

# Dra Cristina Lobo Santiago

Graduada como Cirujano dentista en la facultad de odontología de la Universidad del Desarrollo en Santiago de Chile. Finalizó un DDS en Rehabilitación Oral y oclusión oral en la universidad de Barcelona en 2023.

Desde que egresó como dentista ha estado en contacto con herramientas chairside y el flujo digital en la rehabilitación fija sobre dientes e implantes.


## Descripción del caso

Paciente de 36 años se accidentó en scooter eléctrico. Recibió el impacto del golpe principalmente en sector derecho superior de la cara, con compromiso de órbita y ojo derecho y zona antero-superior derecho de la boca.

### Imagen1

En CBCT maxilar se observa fractura dientes 1.2 en tercio medio radicular y pérdida de tabla ósea vestibular. Diente 1.1 fractura dentinaria de borde incisal distal.

Como medida de urgencia se realizó la ferulización de ambos dientes a dientes vecinos (1.4, 1.3, 1.2, 1.1, 2.1) y la trepanación de urgencia de 1.2.

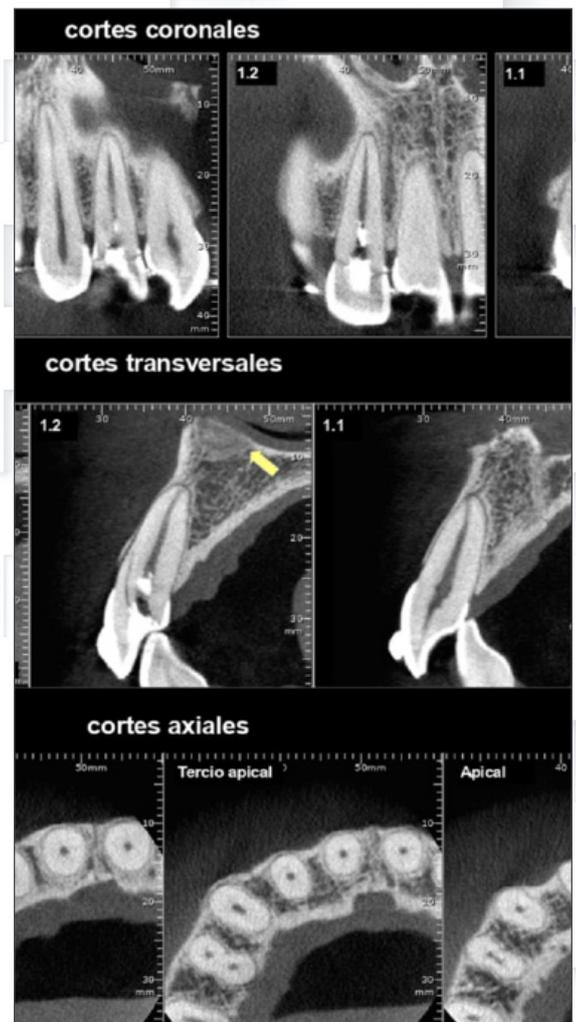


Imágenes 2,3&4

Se realizó una incisión tipo Newman preservando papilas y decolamiento mucoperiostico.


Exodoncia de 1.2 atraumática e instalación de IOI GM Helix 4,0 x 10mm ( Neodent) a 35N.

Se posiciona injerto y membrana de colágeno.

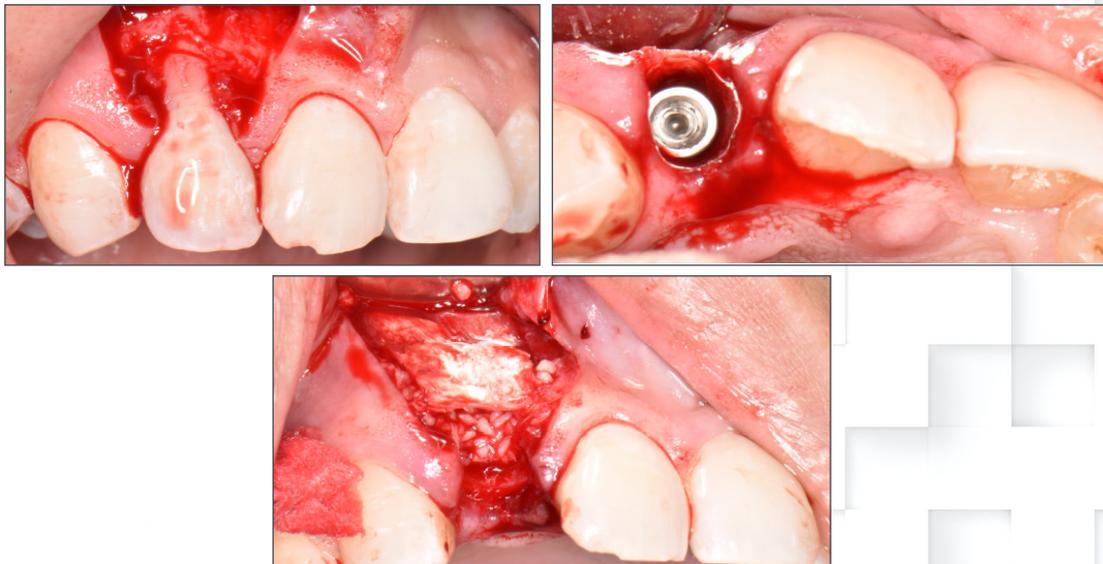

Imágenes 5&6


Se realiza injerto de tejido conectivo libre de paladar y provisionalización inmediata con su diente natural

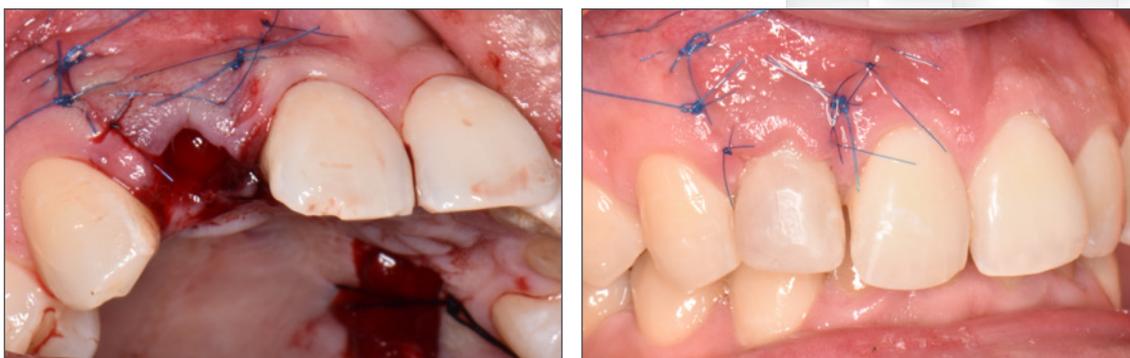

## Imágenes 7&8

Perfil de emergencia conformado del IOI en 1.2, luego de 4 meses de post instalación del implante.

Se observa una óptima conformación de los tejidos blandos alrededor del implante.

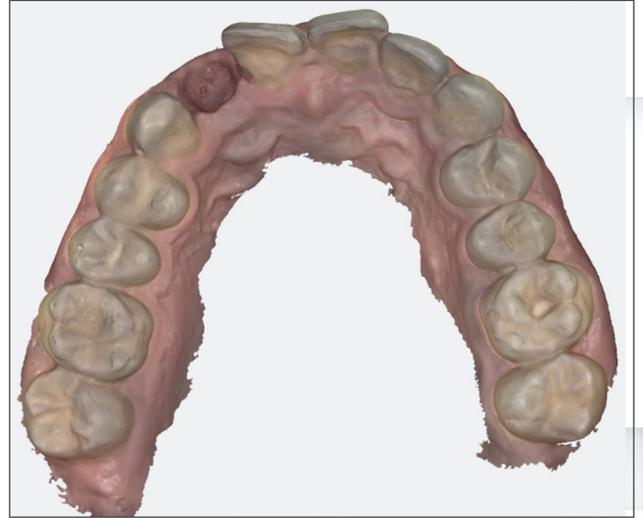

## Imagen 9

Toma de impresión digital del implante 1.2 con scanner intraoral oral OVO.



## Imagen 10

Instalación de la corona de disilicato de litio estratificado del diente 1.2 y la reconstrucción del ángulo incisal de 1.1 con composite.



365 Herndon Pkwy #18  
Herndon, VA 20170,  
USA

3DISC Dental Connect  
Tour CB21 - 16 Place de l'Iris -  
92400 Courbevoie - France

info@3disc.com  
www.3DISC.com

